





## POST-OP WUNDAUFLAGE DER NEUEN GENERATION

Der Innovationsgrad von **Leukomed® Control** spiegelt die Denk- und Arbeitsweise der **Leukoplast®**-Produktgruppe wieder. Produkte sollen dementsprechend nicht nur einfach ihre Aufgabe erfüllen, sondern haben den Anspruch, sowohl für Anwender als auch für Patienten optimale Bedingungen zu schaffen. **Leukomed® Control** punktet hinsichtlich Handling, Effizienz und Komfort. Damit stellt **Leukomed® Control** eine postoperative Wundauflage der neuen Generation dar.


### Anwendungshinweise

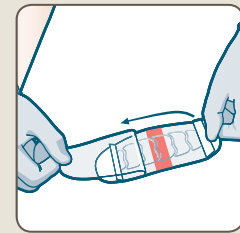


1. Den sterilen Folienverband aus der Verpackung nehmen und die untere, durchsichtige Hilfsfolie abziehen, um die Haftfläche freizulegen.

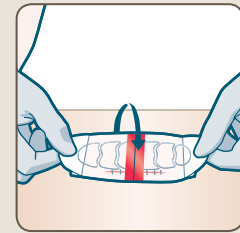


2. Den Folienverband rechts und links festhalten und mit den Gelseln zur Wundfläche drehen und auflegen.

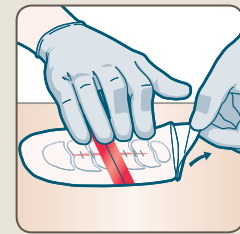

3. Die weiße Applikationshilfe abziehen. Dann den Verband sanft glattstreichen, sodass die Ränder sicher und faltenfrei haften.

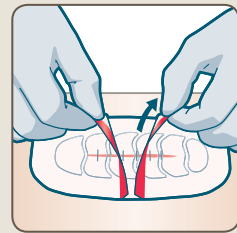


4. Die zwei oberen Träger an den roten Markierungen vorsichtig nach links und rechts abziehen.

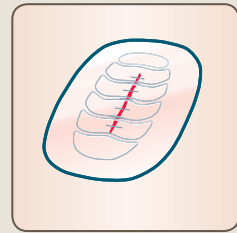

5. Die Wunde regelmäßig inspizieren, ohne dabei den Verband anzuheben.

#### BSN-VIDEOKANAL

Mehr Informationen finden Sie auf dem BSN medical Videokanal. Folgen Sie dazu einfach dem untenstehenden QR-Code:

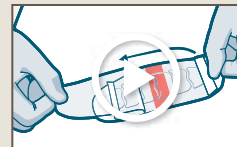

**Leukoplast®**  
Like Skin

## LEUKOMED® CONTROL

WUNDEN IMMER UNTER KONTROLLE



THERAPIEN. HAND IN HAND.

**BSN** medical

70471-00677-01 12/2015

#### BSN medical GmbH

Quickbornstraße 24  
20253 Hamburg  
Deutschland  
www.bsnmedical.de  
Tel. +49 40 / 49 09-45 45  
Fax +49 40 / 49 09-66 66

#### BSN medical Medizinprodukte GmbH

Donau-City-Straße 1  
1220 Wien  
Österreich  
www.bsnmedical.at  
Tel. +43 1/61 400-666  
Fax +43 1/61 400-480

#### BSN medical AG

Nordringstrasse 5  
4702 Oensingen  
Schweiz  
www.bsnmedical.ch  
Tel. +41 0 / 62 388-10 20  
Fax +41 0 / 62 388-10 30

**BSN** medical



# LEUKOMED® CONTROL – MAXIMALE KONTROLLE

Nach einem chirurgischen Eingriff steht die Wunde unter besonderer Beobachtung. Infektionen müssen schnell erkannt und Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Dank der außergewöhnlich hohen Durchsichtigkeit von Trägerfolie und Hydropolymer-Auflage ist eine Wundinspektion mit **Leukomed® Control** jederzeit ohne Verbandwechsel möglich. Das reduziert den Behandlungsaufwand und sorgt für eine heilungsfördernde Wundruhe.

## PRODUKTDESIGN: BIS INS DETAIL DURCHDACHT

Seine verschiedenen Komponenten machen **Leukomed® Control** zu einem wahren Spezialisten im Bereich der postoperativen Wundversorgung. Neben der Transparenz aller Bestandteile bieten vor allem die Hydropolymer-Gelinseln und die multifunktionale Trägerfolie umfangreiche Vorteile.

## HYDROPOLYMER-GELINSELN: DAS BESTE, WAS EINER WUNDE PASSIEREN KANN

Aufgrund ihrer zuverlässigen Absorptionsfähigkeit nehmen die Hydropolymer-Gelinseln von **Leukomed® Control** Exsudat aus der Wunde auf und schließen es sicher ein. Einmal appliziert, bietet **Leukomed® Control** das Gefühl einer zweiten Haut, Schutz und ein optimales Feuchtigkeitsmilieu.

- Hohe Flexibilität in Längs- und Querrichtung
  - ▶ Passt sich Körperkonturen ideal an
  - ▶ Hoher Tragekomfort auch in Bewegung
- Aufbau eines idealen Wundklimas
  - ▶ Unterstützt den Heilungsprozess

### Schnelle Patientenmobilisierung

Patienten nach einer Operation schnell wieder nach Hause oder in die Reha entlassen zu können, ist ein erklärtes Ziel vieler Anwender. **Leukomed® Control** unterstützt diese Bestrebungen:

- Transparenz bietet die Möglichkeit der Wundbeobachtung durch den Patienten
- Flexibilität und Elastizität fördern die Alltagsbewältigung
- Hochwertige Trägerfolie ermöglicht Duschen und Waschen



## KRISTALLKLARER DURCHBLICK: DENN KONTROLLE IST ALLES



Weil nur eine kontrollierte Wunde eine sichere Wunde ist, überzeugt die Transparenz bei **Leukomed® Control**. Ein Verbandwechsel erfolgt nicht mehr routinemäßig, sondern ist nur noch indiziert, wenn Anzeichen einer Wundinfektion sichtbar werden. Damit bietet **Leukomed® Control** sowohl für Anwender als auch für Patienten konkrete Mehrwerte:

- Sehr gute Wundbeobachtung
  - ▶ Schnelle Identifizierung erster Infektionszeichen (SSI\*)
- Weniger Verbandwechsel
  - ▶ Weniger Zeitaufwand
  - ▶ Geringe Gefahr einer Kontamination von außen
- Patient kann zusätzlich die Wundbeobachtung vornehmen
  - ▶ Hohe Compliance



## SICHERER KLEBERAND

- Extrabreiter Kleberand
  - ▶ Sorgt für langen Halt
  - ▶ Ermöglicht tägliche Körperhygiene

\*Surgical site infection.

## TRÄGERFOLIE – ALLES INKLUSIVE



Die multifunktionale Trägerfolie von **Leukomed® Control** ist weit mehr als eine Wundabdeckung. Ihre hohe Qualität bietet zuverlässigen Schutz gegen Viren, Bakterien und Wasser bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

- Keimdicht
  - ▶ Schutz vor Kontamination von außen
- Wasserfest
  - ▶ Ermöglicht tägliche Hygiene
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
  - ▶ Reduziert das Risiko von Hautmazeration

- Extradünn und elastisch
  - ▶ Sehr anschmiegsam
  - ▶ Angenehmer Tragekomfort

### Indikationen

- Leukomed® Control** ist indiziert bei nicht bis schwach exsudierenden Akutwunden wie:
- Chirurgischen Wunden
  - Traumatischen Wunden

**Empfehlung: besonders geeignet zur Wundinspektion bei Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko. Anwendungsdauer bis zu 7 Tage.**

### Bestellinformation Leukomed® Control

Größe	Wundpadgröße	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
5 x 7 cm	2 x 4 cm	7323000	11034249	10	1/28
7 x 10 cm	4 x 7 cm	7323001	11034255	10	1/20
8 x 15 cm	4,5 x 11,5 cm	7323002	11034290	10	1/20
10 x 24 cm	6 x 20 cm	7323003	11034309	5	1/20
10 x 35 cm	6 x 31 cm	7323005	11034338	5	1/10

\*Alle PZNs gelten nur für Deutschland.

