


WATMIND SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (Speichelprobe)

Vorbereitung

- 1 Öffnen Sie Ihre Testpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
- 2 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

Inhalt :


- 1 × Testkassette
- 1 × Steriler Einmaltupfer
- 1 × Röhrchen mit Extraktionspuffer
- 1 × Gebrauchsanweisung

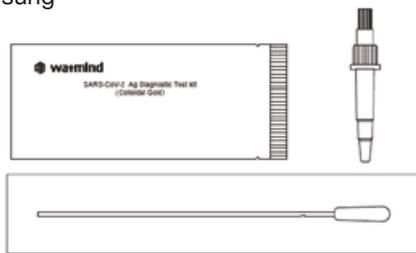

- 3 Öffnen Sie den Beutel und legen Sie die Kassette auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche.
HINWEIS: Berühren Sie keine Teile auf der Innenseite der Karte.

Schritt 1. Ablauf der Probenentnahme

- 1 Öffnen Sie die Tupferpackung und nehmen Sie den Tupfer heraus.
- 2 Entnahme von Speichelproben: Drücken Sie die Zungenspitze gegen die untere Kieferwurzel, um den Speichel anzureichern. Bringen Sie den Oropharyngealtupfer für 10 Sekunden unter die Zunge, drehen Sie ihn 5 Mal und tranken Sie ihn vollständig.

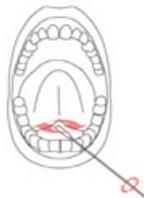

Schritt 2. Probenextraktion

- 1 Öffnen Sie den unteren Deckel des Röhrchens, das mit Probenentnahmelösung vorgefüllt ist.
- 2 Führen Sie den Tupfer in das Probenröhrchen und tauchen Sie anschließend den Tupferkopf vollständig in die Probe ein.
- 3 Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Tupfer mindestens 10 Mal kräftig gegen die Seite des Röhrchens drehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammendrücken, damit die Probe auf dem Tupfer vollständig in dem Extraktionspuffer gelöst wird.



- 4 Knicken Sie den Tupferkopf ab und belassen Sie ihn in dem Röhrchen.



- 5 Schließen Sie die untere Abdeckung des Röhrchens und schwenken Sie das Röhrchen 5-6 Mal.



- 6 Öffnen Sie die obere Abdeckung des Röhrchens.



Schritt 3. Testverfahren

- 1 Geben Sie 100µl (3 Tropfen) der Probe in die Vertiefung auf der Kassette. Schließen Sie den oberen Deckel des Röhrchens.



- 2 Warten Sie 15 Minuten.

HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.



15:00

Schritt 4. Auswertung der Testergebnisse

- 1 Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15-20 Minuten.



Positiv

Ein positives Testergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch an einen Arzt/Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt. Ohne Konsultation eines Arztes sollte keine medizinisch wichtige Entscheidung getroffen werden. Die Möglichkeit eines falsch-positiven sowie eines falsch-negativen Ergebnisses kann niemals ausgeschlossen werden. Sollten Sie ein negatives Ergebnis erhalten, aber trotzdem Symptome wie Husten, Fieber oder Schnupfen verspüren, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt/Hausarzt zu kontaktieren. Auch ohne Symptome und bei negativem Ergebnis halten Sie sich bitte weiterhin an die geltenden Schutzmaßnahmen.



Negativ



Ungültig